



THUASNE

TRATTAMENTO
DEL LINFEDEMA
E DELLE CICATRICI



Gentili clienti,

siamo lieti di condividere con voi il nostro nuovo catalogo, che presenta le nostre soluzioni per il trattamento del Linfedema e delle Cicatrici.

Nel difficile periodo che stiamo vivendo, nonostante le sfide del contesto globale, il nostro modello di business totalmente integrato ci permette quotidianamente di limitare l'impatto di tutti i fattori negativi e garantirvi la consegna dei nostri prodotti.

Oggi più che mai, Thuasne è impegnata al vostro fianco, come partner forte, per fornire soluzioni innovative, efficienti e adatte a migliorare la mobilità e la qualità della vita dei pazienti.

Scoprite le nostre nuove soluzioni, frutto del lavoro dei nostri team di ricerca e sviluppo, marketing, design e produzione.

Per accompagnarvi ogni giorno, continuiamo a impegnarci nello sviluppo di servizi e contenuti che promuovano la mobilità e l'agilità.

Vi ringraziamo per la vostra fiducia e vi auguriamo continui successi.

Delphine Hanton
Chief Executive Officer



Elizabeth Ducottet
Chairman and CEO



IL GRUPPO THUASNE ha 175 anni

Dalla sua sede di Saint-Etienne, il Gruppo THUASNE attinge da più di 175 anni al suo profondo know-how per ideare, sviluppare e produrre dispositivi medici che consentano a tutti i pazienti e ai consumatori di diventare protagonisti attivi della propria salute.

Sviluppatasi durante la storia comune di 6 generazioni di imprenditori, THUASNE offre soluzioni concrete, semplici, personalizzate e innovative per migliorare la mobilità, in più di 100 Paesi. La nostra competenza è rivolta ai pazienti nei settori dell'ortopedia (cinture e tutori), della compressione terapeutica (flebologia, linfologia, cura delle ferite), della salute delle donne (protesi mammarie esterne, lingerie tecnica) e dell'assistenza domiciliare (ausili).

“Made in Thuasne”: La capacità di controllare pienamente ogni fase della **catena del valore**

Poiché Thuasne si impegna ad offrire ai pazienti e agli operatori sanitari prodotti efficaci e di qualità, si sforza di garantire che tutti i suoi prodotti siano progettati, realizzati e consegnati utilizzando gli elevatissimi standard definiti dal Gruppo nel corso della sua lunga storia.

Thuasne oggi



2,400
dipendenti
in tutto il mondo



un fatturato di
286 milioni
di euro nel 2023



Oltre il 50%
delle vendite realizzato
a livello internazionale
(fuori dalla Francia)



Una presenza commerciale in
100 paesi



14
siti industriali in Europa
e negli Stati Uniti



22,000
clienti professionisti



Tra 30 e le 40
nuove referenze di prodotto
ogni anno



5
brevetti internazionali registrati
ogni anno



15 milioni
di km di filo lavorato a maglia



5,700
di tessuto prodotto ogni anno

Cura con saggezza
con le soluzioni
Thuasne

In tutto ciò che facciamo, crediamo nella sfida allo status quo. Crediamo che si debba pensare diversamente.

Il nostro modo di sfidare lo status quo è quello di produrre le nostre soluzioni assicurandoci che siano **efficienti**^(1,2), **cl clinicamente testate**^(2,3,4), **facili da usare**⁽¹⁾ e **confortevoli**^(2,5).

- 40 anni di esperienza nel campo della terapia compressiva
- 2 siti di produzione di dispositivi "su misura" in Europa
- Diversi marchi altamente riconosciuti
- Soluzioni di comprovata efficacia clinica
- Soluzioni personalizzate che accompagnano il paziente lungo tutto il percorso di cura



ASQUAL	
CLASS	1 2 3 4 10 - 15 mmHg
CLASS	1 2 3 4 15 - 20 mmHg
CLASS	1 2 3 4 20 - 36 mmHg
CLASS	1 2 3 4 > 36 mmHg
RAL	
CLASS	1 2 3 18 - 21 mmHg
CLASS	1 2 3 23 - 32 mmHg
CLASS	1 2 3 34 - 46 mmHg

Standard di qualità



Alcuni dei nostri dispositivi sono conformi allo standard Oeko-Tex 100⁽⁶⁾. In questo modo Thuasne garantisce che i materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti siano sicuri per la salute e l'ambiente.



Lymphatex è certificato RAL e quindi conforme agli standard RAL.



Lymphatex Essential e Lymphatex Expert sono certificati ASQUAL e quindi conformi agli standard ASQUAL.

(1) Dossier marcatura CE.
 (2) Mestre Interest of an auto adjustable night time compression sleeve (MOBIDERM Autofit in maintenance phase of upper limb lymphedema: the MARILYN pilot RCT Support Care Cancer (25:2455 2462) 2017 Page 6 & 7.
 (3) Todd Mobiderm Autofit: an adjustable sleeve that enables patients to self manage lymphedema Chronic edema April 2018.
 (4) POLIT Prospective multicentre observational study of lymphedema therapy: POLIT study Pr Quéré Journal des maladies Vasculaires 2014.
 (5) Lymphatex Expert: ETN 280 Dossier Textile Polyamide July Aug 2017.
 (6) The list of products Oeko-Tex certified is available on demand.

Contenuti

IL LINFEDEMA	4
Sistema linfatico	4
Stadi del linfedema	5
Origine del linfedema	6
Gestione del linfedema	7
TRATTAMENTO DEL LINFEDEMA	8
La fase di riduzione	8
- Dispositivi MOBIDERM	10
- KIT BIFLEX	12
- Bendaggi compressivi	14
- Accessori	17
La fase di mantenimento	18
 Contenimento e Mobilizzazione	21
- MOBIDERM Intimate Bra	22
- MOBIDERM Intimate Shorts	24
- MOBIDERM auto fit ..	26
- MOBIDERM Standard	30
- MOBIDERM Su Misura	31
- Istruzioni per l'utilizzo e la cura	32
GRANDI USTIONI E TRATTAMENTO DELLE CICATRICI	33
Cicatrex	34
Istruzioni per l'utilizzo e la cura	40
Cicatrex Standard	41
Cicatrex Su Misura	44
Cicatrex Contour	46
Opzioni	48
SU MISURA	50



INFORMAZIONI
UTILI



ISTRUZIONI PER
LA CURA



DISPOSITIVO
STANDARD



DISPOSITIVO
SU MISURA



TRAMA
CIRCOLARE



TRAMA
PIATTA




ISTRUZIONI
PER L'UTILIZZO

Sistema linfatico

"Il sistema linfatico è costituito da una serie di canali chiamati vasi linfatici, dai linfonodi e da alcuni organi.

Aiuta a proteggere l'organismo da malattie e infezioni. È la parte più importante del sistema immunitario ⁽¹⁾."

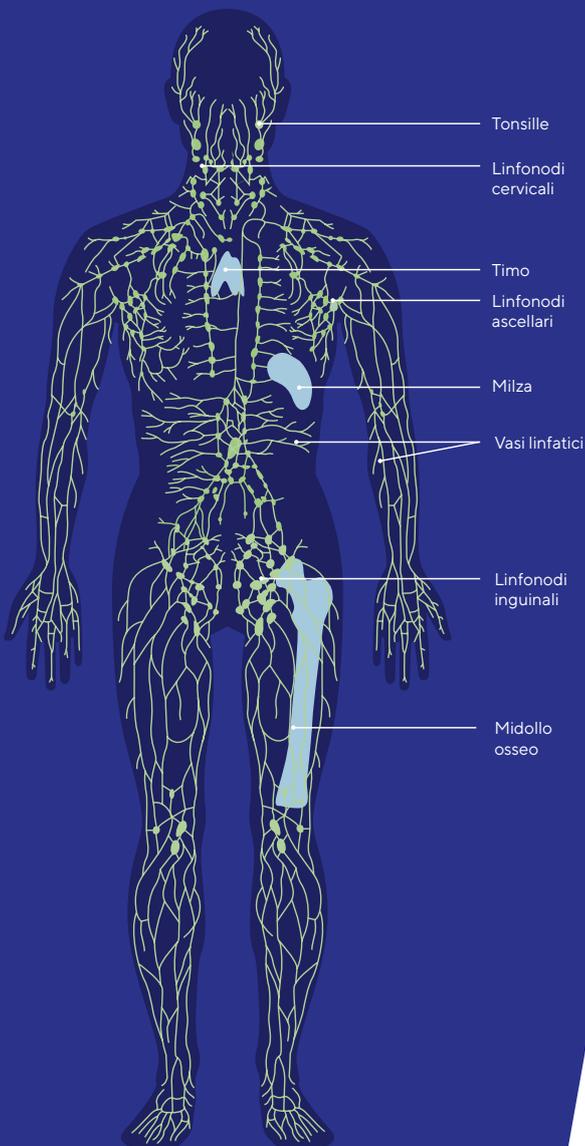

CIRCOLAZIONE LINFATICA⁽²⁾

I vasi linfatici trasportano la linfa in tutto il corpo.

I movimenti del corpo e la contrazione muscolare assicurano la circolazione della linfa, oltre alle unità contrattili che si trovano all'interno dei vasi linfatici.

La linfa viene filtrata attraverso i linfonodi ed alcuni organi per rimuovere batteri, virus e altre sostanze estranee.

LINFEDEMA

Il linfedema è una malattia cronica causata da un malfunzionamento del sistema linfatico dovuto a una malformazione (linfedema primario) o a un danno (linfedema secondario)⁽³⁾.

Il risultato è un blocco o un rallentamento della circolazione della linfa tra le cellule e i tessuti del corpo. La linfa accumulata nei tessuti sottocutanei provoca il gonfiore di una o più parti del corpo (di solito gli arti superiori, gli arti inferiori o la zona genitale) generando disagio, pesantezza e perdita di mobilità⁽⁴⁾.

Il linfedema può svilupparsi in modi diversi. Per alcune persone può essere temporaneo e diminuire leggermente nel tempo, per altre può persistere e diventare resistente⁽³⁾.

(1) <https://www.e-cancer.fr/Dictionnaire/G/ganglion-lymphatique-December-2019>

(2) <https://www.e-cancer.fr/Dictionnaire/L/lympe-December-2019>

(3) HAS - La compression médicale dans le traitement du Lymphoedème - 2010

(4) <https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Lymphoedeme-Lymphoedeme-Mars-2020>

Stadi del linfedema

Esistono **4 stadi del linfedema**⁽⁵⁾.

Questi stadi possono essere raggruppati in **3 livelli di gravità**:

Lieve

STADIO 0

- Il gonfiore è poco visibile
- I sintomi sono: pesantezza dell'arto interessato, leggero formicolio e affaticamento
- La comparsa dell'edema richiede diversi mesi o addirittura anni

STADIO I

- Possibile *pitting* positivo
- La cute e i tessuti non risultano danneggiati in modo permanente
- Il Linfedema è reversibile
- L'eccesso di volume risulta inferiore al 20%

Moderato

STADIO II

- Possibile *pitting* positivo
- Pieghe, infiammazioni e modificazioni cutanee
- Edema non reversibile
- L'eccesso di volume risulta compreso tra il 20 e il 40%
- Aumento del rischio di infezione cutanea

STADIO II TARDIVO

- Segno di Stemmer positivo
- Fibrosi del tessuto
- Edema permanente
- Pieghe, infiammazioni e modificazioni cutanee
- L'eccesso di volume risulta compreso tra il 20 e il 40%
- Aumento del rischio di infezione cutanea

Grave

STADIO III

- Arto molto voluminoso
- Forma non regolare dell'arto con pieghe cutanee
- Edema permanente
- *Pitting* negativo
- Complicazioni dermatologiche
- Eccesso di volume superiore al 40%
- Diminuzione della mobilità

Trattamento del linfedema:
la fase di riduzione

Trattamento del linfedema:
la fase di mantenimento

Grandi ustioni
e trattamento delle cicatrici


Su misura

Origine del linfedema

Esistono 2 tipi di linfedema:

LINFEDEMA PRIMARIO



Correlato a un difetto costituzionale del sistema linfatico. Congenito o familiare, colpisce soprattutto gli arti inferiori. Nella maggioranza dei casi, è necessario iniziare la gestione della condizione fin dall'infanzia. Il linfedema primario può insorgere anche nei giovani adulti.

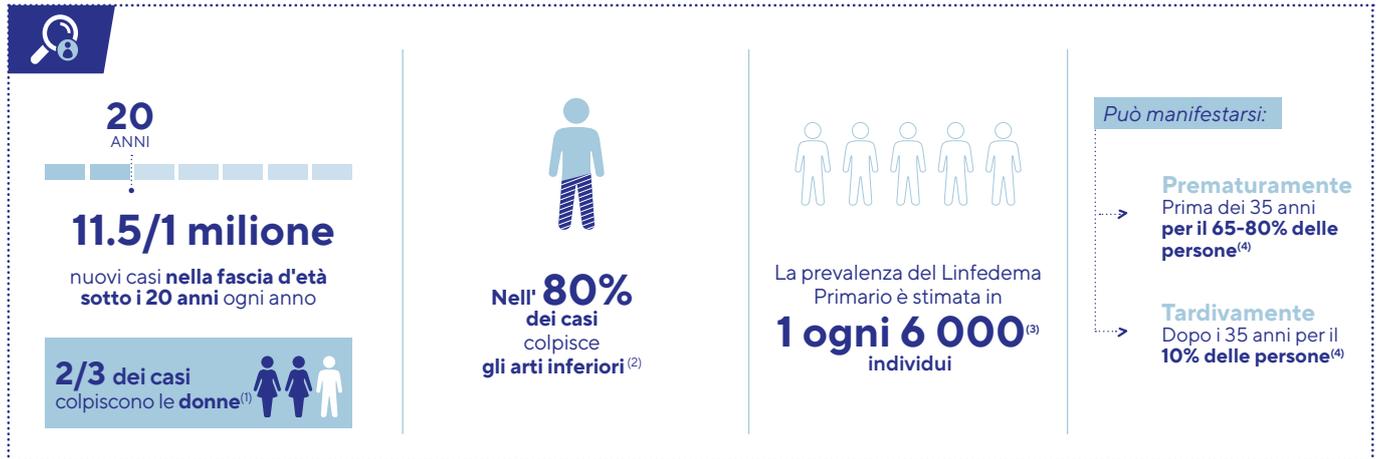

LINFEDEMA SECONDARIO

Risulta da un danno del sistema linfatico associato a un trauma, a una malattia come il cancro e al suo trattamento (dissezione dei linfonodi, radioterapia) o a una contaminazione.

Il linfedema secondario riguarda

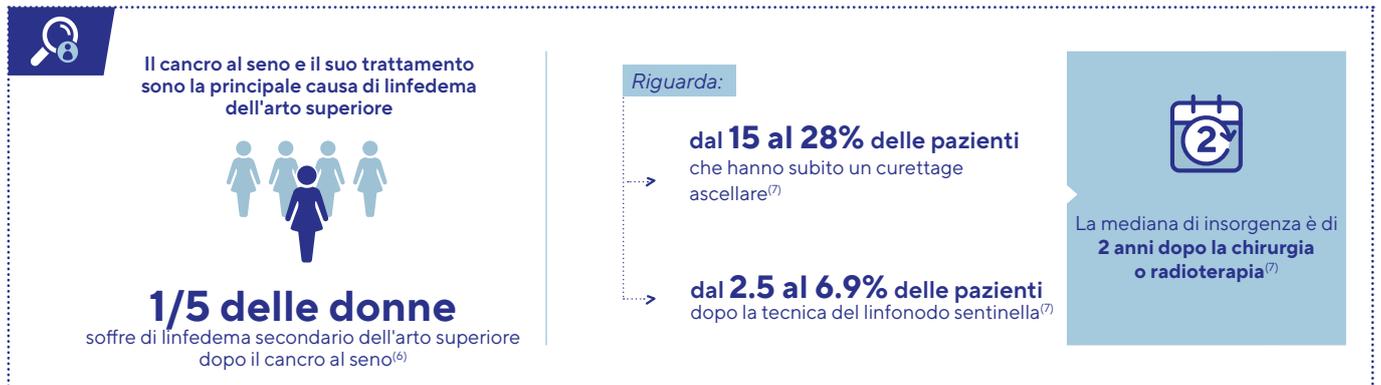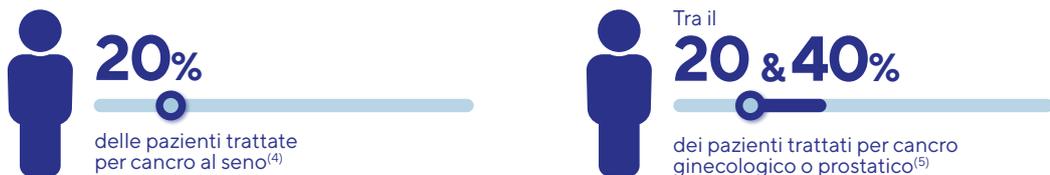

(1) Les lymphoedèmes du membre inférieur - Dr Marlène Coupé - Mars 2020 - Pages 22-23

(2) Lymphoedème primaire - Orphanet - Mars 2020 - Page 2

(3) Orphanet, webportal on rare diseases and orphan drugs, www.orpha.net : Primary lymphedema - November 2007 - Document prepared in collaboration with: Dr Stephane Vignes / Consultation of the reference center for rare vascular diseases, Cognacq-Jay Hospital, Paris.

(4) Disipio T et al. Lancet Oncol 2013; 14: 500 Incidence of unilateral arm lymphedema after breast cancer: a systematic review and meta-analysis

(5) Beesley V et al. Cancer 2007 Jun 15;109(12):2607-14. Lymphedema after gynecological cancer treatment: prevalence, correlates, and supportive care needs. Rasmussen E. et al. Radiat Oncol. 2013 Nov 19;8:271 Low rate of lymphedema after extended pelvic lymphadenectomy followed by pelvic irradiation of node-positive prostate cancer.

(6) Lymphoedèmes secondaires du membre supérieur après cancer du sein - S. Alran, A. Arnaud, J.-C. Biffaud, J.-C. Ferrandez, P. Heudel - 13 March 2016

(7) Prise en charge du lymphoedème secondaire du membre supérieur après un cancer du sein - March 2014

Gestione del linfedema

I pazienti affetti da linfedema dovrebbero beneficiare di una gestione coordinata e ricevere informazioni adeguate alle loro esigenze.

Gli obiettivi principali del trattamento sono:

- Riduzione e successiva stabilizzazione del volume
- Miglioramento della funzione dell'arto
- Prevenzione dei rischi di complicanze
- Educazione del paziente e supporto psico-sociale

Questa malattia cronica richiede quindi una gestione continuativa, che può essere suddivisa in due fasi essenziali e complementari:



1 La fase di **RIDUZIONE**



2 La fase di **MANTENIMENTO**

che si susseguono a seconda dell'evoluzione del linfedema.

*La terapia compressiva medica
è uno degli elementi chiave
del trattamento⁽⁸⁾.*

Trattamento del linfedema:
la fase di riduzione

Trattamento del linfedema:
la fase di mantenimento

Grandi ustioni
e trattamento delle cicatrici

Su misura

La fase di **riduzione**

La fase di riduzione è nota anche come trattamento decongestionante intensivo.

L'obiettivo è quello di ottenere la massima riduzione dell'edema, per avvicinarsi il più possibile al volume dell'arto sano opposto.

I principali trattamenti utilizzati sono:

- **Drenaggio linfatico manuale (MLD)**, effettuato da un fisioterapista specificamente formato, per stimolare e facilitare la circolazione della linfa favorendo lo sblocco dei linfonodi
- **Bendaggi multicomponente** ad azione riducente e drenante, che possono essere adattati al volume e a tale scopo riposizionati
- **Attività fisica guidata** per migliorare la circolazione linfatica, recuperare la mobilità e la flessibilità
- **Cura della pelle**, per prevenire le complicazioni legate all'accumulo di linfa

Questa fase può durare da una a diverse settimane, a seconda della gravità del linfedema, e può essere rinnovata in seguito.



Protocollo Thuasne

La fase di riduzione viene solitamente eseguita utilizzando bendaggi multicomponente⁽¹⁾

Il vantaggio dei bendaggi è quello di potere essere riposizionati più volte per garantire il miglior adattamento alle continue variazioni di volume dell'edema.

Esistono diversi tipi di bendaggi ed è il loro uso combinato che riduce l'edema⁽²⁾.



1

PROTEGGERE la cute

BENDA PROTETTIVA IN COTONE

A diretto contatto con la pelle, questa benda tubolare in cotone garantisce un contenimento stretto dell'arto ed una morbida protezione della cute indebolita dal linfedema



2

MOBILIZZARE l'edema

BENDA MOBIDERM

Utilizzata sotto un bendaggio elastico compressivo, la tecnologia Mobiderm mobilizza il tessuto sottocutaneo edematoso o indurito



3

CONTENERE l'edema

BENDA BIFLEXIDEAL A CORTA ESTENSIONE

Un bendaggio *short-stretch* (<100% di estensione) come terzo strato aiuta a contenere l'edema ed ha un effetto drenante in caso di attività fisica⁽⁴⁾



4

COMPRIMERE l'edema

BENDA LUNGA GRADUATA BIFLEX

Un bendaggio di media elasticità come ultimo strato applica una pressione costante, anche a riposo.

BIFLEX 16+ (leggera) è consigliata per linfedemi da lievi a moderati

BIFLEX 17+ (forte) è consigliata per linfedemi da moderati a gravi



Scoprite i video tutorial che presentano le tecniche di bendaggio multicomponente sul nostro canale **YouTube Thuasne!**




(1) HAS – Dispositifs de compression médicale à usage individuel – Utilisation en pathologies vasculaires – Sept 2010 – Page 14 (Medical compression devices for individual use – Use in vascular pathologies)
 (2) European Wound Management Association (EWMA). Focus Document: Lymphoedema bandaging in practice. London: MEP Ltd, 2005.
 (3) Futura Tech - Du végétal aux textiles - Récolte, transformation et utilisation du coton (From plant to textile - Harvesting, processing and use of cotton).
 (4) Quéré - Prospective multicenter observational study of lymphedema therapy: POLIT study - Vascular Disease Journal - 2014 - Pages 4 et 5

La tecnologia **MOBIDERM**

MOBIDERM è un dispositivo medico composto da blocchi di schiuma racchiusi tra due bende in tessuto non tessuto.

La tecnologia **MOBIDERM** può essere utilizzata sotto un bendaggio compressivo di riduzione (nella forma di benda o placca), oppure incorporata in indumenti mobilizzanti.

Il differenziale di pressione che si crea tra l'area di azione di ogni blocco e l'area circostante, **favorisce il flusso del liquido linfatico e ottimizza l'efficacia del drenaggio⁽¹⁾**.

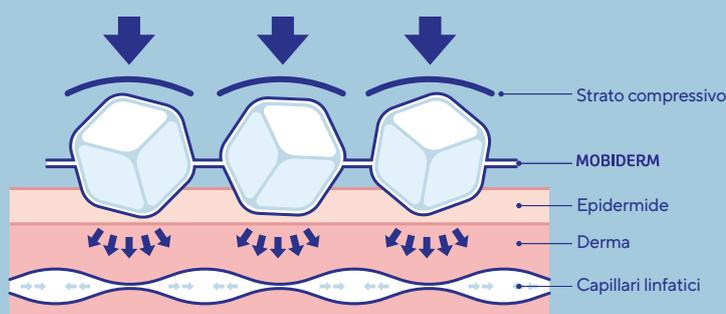

Dispositivo
brevettato⁽⁴⁾

EFFICACE

- Rapida riduzione del volume dell'edema⁽²⁾.

PRATICO

- Leggero e confortevole, consente al paziente di mantenere la sua libertà di movimento⁽³⁾.

CONFORTEVOLE

- La capacità del dispositivo di conformarsi alla morfologia corporea fornisce un adattamento anatomico ottimale.

(1) Todd - Mobiderm Autofit: an adjustable sleeve that enables patients to self-manage lymphedema - Chronic edema - April 2018 - Page 6

(2) Quéré - Prospective multicenter observational study of lymphedema therapy: POLIT study - Vascular Disease Journal - 2014 - Pages 4 and 5

(3) Mestre - Interest of an auto-adjustable night-time compression sleeve (MOBIDERM Autofit) in maintenance phase of upper limb lymphedema: the MARILYN pilot RCT Support Care Cancer (25:2455-2462) - 2017 - Page 7

(4) Solo nei seguenti paesi: Algeria, Austria, Belgio, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Marocco, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Regno Unito

MOBIDERM Placche

Dimensione	Design	Codice
25 cm x 25 cm	Blocchi piccoli 5 mm x 5 mm	371001 02502501
25 cm x 1 m		371001 03310001
20 cm x 1 m	Blocchi grandi 15 mm x 15 mm	371001 03310002
21 cm x 25 cm		371001 02102502




MOBIDERM Bende

Dimensione	Design	Codice
10 cm x 3 m	Blocchi piccoli 5 mm x 5 mm	372001 01030001
	Blocchi grandi 15 mm x 15 mm	372001 01030002



BLOCCHI DI 2 DIMENSIONI

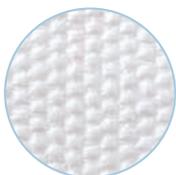

BLOCCHI PICCOLI

- Più efficaci nel caso di edemi particolarmente induriti
- Più adatti per le zone impervie (pazienti pediatrici, mani/piedi, seno...)



BLOCCHI GRANDI

- Più adatti lungo gli arti

KITBIFLEX

Kit di 2 bende elastiche compressive a corta estensione lavabili



PROTEGGE la cute

BENDA ELASTICA ESTREMAMENTE SOFFICE

(33.2% di allungamento massimo)


- Morbida sulla pelle grazie ai componenti in microfibra poliammidica e viscosa
- Protegge la cute e le protuberanze ossee
- Contiene l'edema



MOBILIZZA l'edema

BENDA MOBIDERM

Utilizzata sotto un bendaggio compressivo, la tecnologia Mobiderm mobilizza i tessuti sottocutanei edematosi o induriti⁽¹⁾

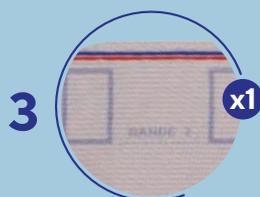

COMPRIME l'edema


BENDA ELASTICA BIESTENSIVA

(81.6% di allungamento massimo)

Fornisce il livello di compressione richiesto nel trattamento del linfedema

3 TAGLIE PER ADATTARSI ALLA MORFOLOGIA DI OGNI PAZIENTE

Taglia	Circonferenza caviglia	Benda 1	Benda 2	Larghezza benda	Codice
1	< 25 cm	4 m	3.5 m		170050 20199999
2	25 - 30 cm	4.5 m	4 m	10 cm	170050 20299999
3	> 30 cm	5 m	4.5 m		170050 20399999

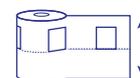


**1 larghezza:
10 cm**

(1) CompuLce study: Evaluation of the clinical efficacy and safety of the KitBiflex 2-layer compression system versus the PROFOR® 4-layer compression system in the treatment of leg ulcers of venous origin (stage C6). National, multicenter, randomized, open-label, two parallel-group, phase IIIb clinical study. Study #: NCT02782689.



LAVABILE

Le due bende presenti nel kit sono lavabili in lavatrice a 40°C*

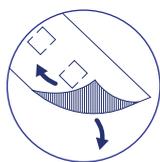

RIPOSIZIONABILE

Le due bende presenti nel kit possono essere rimosse e riposizionate in caso di necessità (cambio medicazione, variazioni marcate dell'edema)



FACILITÀ D'USO

- Le due bende sono numerate e graduate per facilitarne l'applicazione
- Il sistema di calibrazione brevettato rende possibile controllare la tensione della benda e garantirne la riproducibilità di applicazione⁽¹⁾



FISSAGGI AUTO-GRIPPANTI

- Garantiscono una buona conservazione della benda
- Non rischiano di ferire il paziente


Per il **96%** dei pazienti trattati, gli operatori sanitari sono rimasti nel complesso soddisfatti o molto soddisfatti del dispositivo⁽²⁾

Efficacia relativa al trattamento del Linfedema:

la diminuzione del volume in eccesso dell'arto superiore è stata di **-35 ± 22% o -340.41 ± 269.44 mL⁽²⁾**.

Miglioramento del comfort del paziente:

Dalla prima visita all'ultima visita effettuata, significativa riduzione della sensazione di disagio (**-29%**), pesantezza (**-33%**), gonfiore/tensione (**-38%**) e dolore (**-21%**) ed aumento della morbidezza della pelle⁽²⁾.

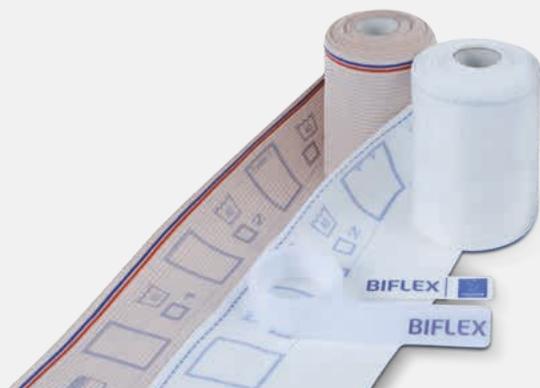

Queste bende possono essere lasciate applicate sull'arto giorno e notte, fino a 7 giorni

* Istruzioni per l'uso

(2) Post-Marketing Clinical Follow-up in the treatment of lymphoedema with the Biflex Kit - 2022/04

Bendaggi compressivi

Protezione cutanea

BENDA PROTETTIVA IN COTONE

Benda tubolare. Composizione 100% cotone.
Protezione della superficie cutanea sotto bendaggio non adesivo.

Larghezza	Lunghezza	Colore	Codice
11 cm	4 m	Bianco	0101010

**BENDA PROTETTIVA SOTTOBENDAGGIO****Benda sottile in schiuma elastica (gommapiuma)**

Protezione della superficie cutanea.
Accessorio che può essere utilizzato in associazione con altri dispositivi per avere una protezione della pelle al di sotto di contenimento e compressione

Larghezza	Lunghezza	Colore	Codice
7 cm	27 m	Bianco	5507

Contenimento

BIFLEXIDEAL**Benda compressiva a corta estensione**

INDICAZIONI: Trattamento dell'edema (traumatico o cronico) - Trattamento del linfedema - Insufficienza venosa cronica (in alternativa alle calze compressive) - In seguito a scleroterapia o chirurgia delle vene varicose - Trattamento delle ulcere venose (con SPI > 0,8 o sotto stretto controllo medico per SPI compreso tra 0,5 e 0,8) - Trattamento sintomatico di trombosi venose acute, profonde o superficiali - Prevenzione della sindrome post-trombotica: alternativa alle calze a compressione per pazienti a rischio - Alternativa alle calze a compressione per il trattamento dell'edema o del gonfiore delle gambe durante la gravidanza - Trattamento dei sintomi legati a lesioni dei tessuti molli. Estensione del 65% a una forza di 45 cN/cm.



Larghezza	Lunghezza	Colore	Codice
3 cm	5 m	Bianco	110002003
6 cm			110002006
8 cm			110002008
10 cm			110002010

BIPLAST**Benda compressiva a corta estensione adesiva**

INDICAZIONI: Lesioni dei tessuti molli o del sistema muscolo-scheletrico. Bendaggio: supporto post-trauma. Fratture delle piccole ossa (dita, piede, etc.). Deformità ossee congenite o acquisite del piede. Malattie vascolari o linfatiche che richiedono un bendaggio a corta estensione o multicomponente. Adesione multidirezionale al bordo del nastro. Flessibile e regolabile.
*50,2% di allungamento massimo



Larghezza	Lunghezza	Colore	Codice
3 cm	2,5 m	Bianco	200002003
6 cm			200002006
8 cm			200002008
10 cm			200002010
15 cm			200002015
20 cm			200002020

Bendaggi compressivi



Compressione

BIFLEX+ GRADUATA

Benda elastica compressiva graduata

Benda elastica biestensibile. Elastica in lunghezza ed estensibile in larghezza. Controllo della tensione replicabile grazie all'indicatore specifico. Possibilità di sovrapposizioni multiple per ottenere diversi livelli di pressione

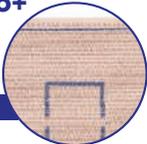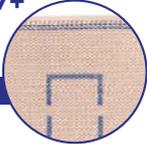


2 versioni	Colore	Larghezza	Lunghezza	Codice
BIFLEX 16+ (Leggera)  1 filo	Beige	8 cm	3 m	16001200830
			3.5 m	16001200835
			4 m	16001200840
			5 m	16001200850
		10 cm	3 m	16001201030
			3.5 m	16001201035
			4 m	16001201040
			5 m	16001201050
BIFLEX 17+ (Forte)  2 fili	Beige	8 cm	4 m	17001200840
			3 m	17001201030
		10 cm	3.5 m	17001201035
			4 m	17001201040
			5 m	17001201050
			5 m	17001201050

Trattamento del linfedema:
la fase di riduzione

Trattamento del linfedema:
la fase di mantenimento

APPLICAZIONE DI BIFLEX IN 2 SEMPLICI PASSI

1/ ALLUNGAMENTO

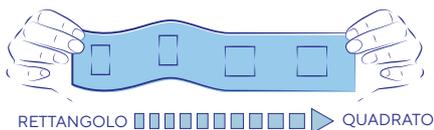

2/ SOVRAPPOSIZIONE

BIFLEX 16+		BIFLEX 17+	
Pressione □□□□	Pressione □□□□	Pressione □□□□	Pressione □□□□
Mezzo quadrato Sovrapposizione	Quadrato intero Sovrapposizione	Mezzo quadrato Sovrapposizione	Quadrato intero Sovrapposizione

Grandi ustioni
e trattamento delle cicatrici

Su misura

Bendaggi compressivi

Compressione

BIFLEX+ PRATIC

Benda elastica compressiva graduata con staffa

La staffa di fissaggio facilita l'uso di questa benda. Migliora l'autonomia del paziente



Modello	Larghezza	Lunghezza	Colore	Codice
BIFLEX 16+ PRATIC (Leggera)	8 cm	3 m	Beige	160003 00830
		4 m		160003 00840
	10 cm	3 m	Beige	160003 01030
		4 m		160003 01040
BIFLEX 17+ PRATIC (Forte)	10 cm	3 m	Beige	170003 01030
		4 m		170003 01040




UTILIZZO DELLA STAFFA

1



Infilare il piede nella staffa

2

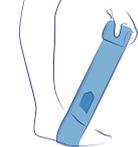

Cucitura in corrispondenza della parte superiore del piede

3



1° giro intorno al tallone

4



2° giro fissaggio dal basso

5



3° giro fissaggio dall'alto

6



Applicazione circolare



BENDA IN SCHIUMA

Schiuma di lattice emulsionata

Ottimizzazione del trattamento compressivo attraverso il livellamento dei rilievi anatomici.

Il taglio smussato permette di sovrapporre il bendaggio senza renderlo troppo spesso.

Grazie alla schiuma a celle aperte, il bendaggio è permeabile all'aria e aiuta a prevenire qualsiasi rischio di macerazione⁽¹⁾

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Codice
8 mm	8 cm	1 m	5308
	10 cm		5310
12 mm	10 cm	1 m	5410

VARICO

Cuscinetti in schiuma di lattice

Ottimizzazione del trattamento compressivo attraverso il livellamento dei rilievi anatomici.

Grazie alla schiuma a celle aperte, il bendaggio è permeabile all'aria e aiuta a prevenire qualsiasi rischio di macerazione⁽¹⁾



Modello	Dimensioni	Confezionamento	Codice
0	63 mm x 87 mm	al paio	520009 1000
1	70 mm x 132 mm	unità	520009 1100
2	125 mm x 164 mm	unità	520009 1200
3	200 mm x 250 mm	unità	520009 1300



Accessori Biflex



FISSAGGI AUTO-GRIPPANTI

Confezionamento	Colore	Codice
x 4 unità	Bianco	590309

FISSAGGI ELASTICI

Confezionamento	Colore	Codice
x 4 unità	Beige	590209

(1) IFTH report n°180798R

La fase di **mantenimento**

Non appena si ottiene una riduzione di volume soddisfacente, inizia la fase di mantenimento del linfedema.

Il suo obiettivo è quello di stabilizzare il volume dell'arto, ridotto nella fase iniziale, o continuarne la riduzione, ma anche quello di evitare ricadute e consentire al paziente di recuperare la normale mobilità.

Questa fase viene gestita con degli indumenti elastocompressivi che vengono regolarmente rinnovati sotto supervisione medica



Indossati quotidianamente, dal risveglio al momento di coricarsi, gli indumenti compressivi da giorno assicurano:

- **la compressione**, che ha lo scopo di facilitare la circolazione della linfa verso il cuore, evitando così la formazione di edemi.
- **il contenimento**, che impedisce all'edema di recuperare più di una certa percentuale di volume indipendentemente dalla sua forza di espansione intrinseca.

Sono disponibili vari modelli di indumenti (calze, guaine...) in diverse classi di compressione

	ASQUAL	RAL
Classe	Francia (AFNOR G30 102B STANDARD)	Germania (RAL-GZ 387:2000 STANDARD)
Classe 1	10 - 15 mmHg	18 - 21 mmHg
Classe 2	15 - 20 mmHg	23 - 32 mmHg
Classe 3	20 - 36 mmHg	34 - 46 mmHg
Classe 4	> 36 mmHg	> 49 mmHg



Per ottimizzare l'efficacia del trattamento, si raccomanda di indossare un dispositivo a compressione leggera anche durante il riposo notturno.

Gli indumenti **MOBIDERM** sono stati sviluppati per mobilitare l'edema durante il riposo notturno. Offrono un'alternativa all'autobendaggio estremamente efficace, facile da usare e confortevole⁽¹⁾

La fase di mantenimento include anche il drenaggio linfatico manuale con una frequenza minore, nonché l'apprendimento dell'automassaggio e dell'autobendaggio secondo le necessità specifiche. Infine, richiede anche la pratica di un'attività fisica, una cura della pelle adeguata e un regolare monitoraggio medico

(1) Mestre - Interest of an auto-adjustable night-time compression sleeve (MOBIDERM Autofit) in maintenance phase of upper limb lymphedema: the MARILYN pilot RCT Support Care Cancer (25:2455-2462) - 2017 - Page 4





Per il riposo e il trattamento notturno

INDUMENTI MOBIDERM

Per mantenere i risultati ottenuti durante la fase intensiva di applicazione dei bendaggi multicomponente, il paziente deve avere accesso a un trattamento permanente e confortevole durante la successiva fase di mantenimento.

L'autonomia del paziente contribuirà all'osservanza del trattamento prescritto e ne potrà garantire il successo a lungo termine.

Subentrando alla compressione diurna e come alternativa all'autobendaggio, gli indumenti **MOBIDERM** sono stati sviluppati con l'obiettivo di continuare la mobilizzazione dell'edema durante la notte, rafforzando in tal modo gli effetti del trattamento diurno⁽¹⁾⁽²⁾.

Questi indumenti sono realizzati con un materiale morbido ed elastico progettato per erogare un livello di pressione ben accettato dai pazienti nella fase di riposo e durante la notte⁽²⁾. Sono dotati, al loro interno, della tecnologia **MOBIDERM** che favorisce la circolazione linfatica attraverso un'azione "micromassaggiante".

Effecaci

- Rafforzano gli effetti del trattamento diurno⁽¹⁾⁽²⁾
- Mantengono la riduzione del volume dell'edema⁽²⁾

Pratici

- Migliorano l'autonomia e l'autogestione del paziente
- Un unico indumento da indossare

Confortevoli

- Poco invasivi e discreti⁽²⁾
- Non disturbano il sonno⁽²⁾



(1) Todd - Mobiderm Autofit: an adjustable sleeve that enables patients to self-manage lymphedema - Chronic edema - April 2018 - Page 6

(2) Mestre - Interest of an auto-adjustable night-time compression sleeve (MOBIDERM Autofit) in maintenance phase of upper limb lymphedema: the MARILYN pilot RCT - Support Care Cancer (25:2455-2462) - 2017 - Page 6 & 7

MOBIDERM INTIMATE BRA

Reggiseno compressivo per il drenaggio linfatico
 Compressione e riduzione del gonfiore del petto e del torace dopo
 un intervento chirurgico

Per quali pazienti

Mobiderm Intimate Bra è indicato per pazienti con:

- edemi acuti o cronici della mammella e/o della parete toracica
- edemi postoperatori o successivi a radioterapia (solo su cute integra)
- infiltrazioni croniche dopo ricostruzione, edemi cronici residui della parete mammaria

Mobiderm Intimate Bra è composto da:

- Un reggiseno compressivo
- Due pad Mobiderm sagomati, adatti alle tasche di cui il reggiseno è dotato

Caratteristiche

Colore : nudo



Livello di compressione: 7 - 10 mmHg

Composizione

- **Reggiseno compressivo:** poliammide, elastan, poliestere, poliuretano
- **Pad Mobiderm:** poliestere, poliammide, colla acrilica, polietilene espanso



Taglie

Taglia	Misura del torace (in cm)	Coppa	Codice
XS	85 - 90	AA - A	T57130
		B - C	
		D - E	
S	95 - 100	AA - A	
		B - C	
		D - E	
M	105 - 110	AA - A	
		B - C	
		D - E	
L	115 - 120	AA - A	
		B - C	
		D - E	
XL	125 - 130	AA - A	
		B - C	
		D - E	



Il torace


Il reggiseno linfatico compressivo viene utilizzato per la compressione e il drenaggio di edemi nell'area del torace e della parete toracica (ad esempio in seguito a carcinoma mammario).

Dopo un intervento di chirurgia plastica al seno, il reggiseno Mobiderm Intimate Bra ha un effetto di stabilizzazione della forma⁽¹⁾ e fornisce sostegno comprimendo e drenando l'edema⁽²⁾ che può svilupparsi dopo il trattamento.

- Il reggiseno esercita una maggiore pressione⁽³⁾ sulle aree di tessuto interessate dagli edemi. Questo migliora il drenaggio linfatico⁽²⁾.
- La compressione nell'area cicatriziale riduce al minimo lo sviluppo di ematomi⁽⁴⁾.



Reggiseno compressivo

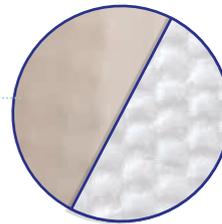

Pad Mobiderm sagomati:

Due imbottiture Mobiderm adatte alle tasche di cui il reggiseno è dotato (le tasche possono anche contenere delle protesi esterne in caso di necessità)

COMFORT⁽¹⁾

- Adattabile alla maggior parte delle corporature: sono disponibili diverse taglie
- Flessibile e sottile: grazie alle proprietà fisiche dei materiali impiegati: poliammide, elastan, poliestere, poliuretano⁽⁶⁾
- Soluzione completa: reggiseno + pad interni
- Possibilità di inserire o meno le imbottiture Mobiderm (o una protesi esterna) all'interno del reggiseno, in base alle esigenze della paziente
- Facile da indossare e da togliere grazie all'apertura sul davanti

EFFICACIA

Tecnologia Mobiderm brevettata: drenaggio dell'edema^(2,5)

DISCREZIONE



Colore neutro: nudo



Può essere indossato di giorno o di notte



Estremamente sottile

(1) Due to its origin; the Mobiderm Intimate bra is based on the Cara compression bra.

(2) I. Quéré, E. Presles, M. Coupé, S. Vignes, L. Vaillant, D. Eveno, S. Laporte, A. Leizorovicz, Investigateurs étude POLIT - Prospective multicenter. Observational study of lymphoedema therapy: POLIT study - Journal des maladies vasculaires 2014) 39, 256-263

(3) Dossier marcaturo CE

(4) Lehrbuch der Lymphologie für Mediziner und Physiotherapeuten Földi, Michael, Kubik, Stefan ISBN 10: 3437453211 / ISBN 13: 9783437453212 Verlag: Urban & Fischer, 2002, S.678, Kap. 20.3.5 (Textbook of lymphology for physicians and physiotherapists)

(5) Mestre - Interest of an auto-adjustable night-time compression sleeve (MOBIDERM Autofit) in maintenance phase of upper limb lymphedema: the MARILYN pilot RCT - Support Care Cancer (25:2455-2462) - 2017 - Page 7.

(6) L'atelier du papetier - Les fibres textiles - 2020

MOBIDERM INTIMATE SHORTS

Pantaloncini compressivi e mobilizzanti
Trattamento del linfedema pelvico e genitale

Per quali pazienti

Mobiderm Intimate Shorts sono indicati per pazienti con:

- Edema pelvico e/o genitale
- Linfedema da lieve a grave
- Edema stabile o progressivo
- Morfologia regolare o irregolare

Caratteristiche

Colori: nero/blu navy

Valori di compressione:

- 15 - 20 mmHg nell'area pelvica
- 5 - 10 mmHg nell'area addominale e a metà coscia

Composizione

- **Pantaloncini:** poliammide, elastan, poliestere
- **Pad Mobiderm:** poliestere, poliammide, colla acrilica, polietilene espanso



Taglie

	cK (cm)	cG (cm)	Codice uomo
1	88 - 94	45 - 54	3737
2	95 - 101	48 - 58	
3	102 - 108	51 - 62	
4	109 - 115	54 - 66	
5	116 - 122	57 - 69	
6	123 - 129	60 - 72	

	cK (cm)	cG (cm)	Codice donna
1	88 - 94	45 - 54	3736
2	95 - 101	48 - 58	
3	102 - 108	51 - 62	
4	109 - 115	54 - 66	
5	116 - 122	57 - 69	
6	123 - 129	60 - 72	

cK (cm): Circonferenza dell'anca

cG (cm): Circonferenza della parte superiore della coscia



Dispositivo
brevettato⁽⁴⁾

COMFORT⁽¹⁾

Tessuto morbido⁽²⁾⁽³⁾ per un comfort maggiore

Adattabile alla maggior parte delle morfologie⁽³⁾:

6 taglie nella versione donna e 6 taglie nella versione uomo

Flessibile e sottile: grazie alle proprietà fisiche dei materiali utilizzati e alla loro combinazione nel design del prodotto, studiata in base alle diverse zone corporee⁽³⁾

Una soluzione completa: pantaloncini + pad Mobiderm

- L'89% dei pazienti ritiene che questo dispositivo rappresenti una soluzione realmente differente rispetto a quanto esistente sul mercato⁽¹⁾
- L'83% dei pazienti ritiene che questo dispositivo sia migliore rispetto ai prodotti alternativi⁽¹⁾ (estetica, spessore, capacità di movimento, comfort, uso quotidiano)

Pad Mobiderm applicabile all'interno dei pantaloncini o rimovibile in base alle esigenze del paziente




Uomo



Donna

DISCREZIONE⁽¹⁾

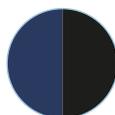

Deposito di brevetto sul modello, colori sobri: nero e blu



Utilizzabile come capo intimo




Può essere indossato sia di giorno che di notte



Estremamente sottile⁽¹⁾



- Compressione mirata (15-20 mmHg) nell'area pelvica, genitale, su glutei e cosce*
- Compressione decrescente verso l'alto e verso il basso*
- Compatibile con le calze elastocompressive

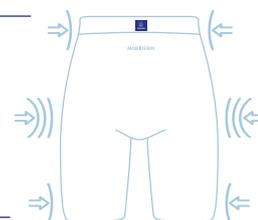

(1) OLYMPY study : Exploratory study to assess the clinical benefits of wearing the MOBIDERM Intimate Short in patients with pelvic and/or genital lymphedema. - 2021 - 32 patients - n° ID-RCB: 2020-A00247-32; primary objective: assessment of the effect of the MOBIDERM Intimate short, after 12 weeks, on an overall impression of change in their quality of life in relation to PL/GL. S. Mestre. New perspectives in genital lymphedema management. 46th European Society of Lymphology Congress - June 16-17-18 2022. Assisi Italy

(2) CC1508 - Rationnel de formulation - Janvier 2022 (Formulation plan)

(3) CC1508 - Panty Mobiderm - Plan de validation (2019) (Validation Plan)

(4) Brevetto depositato nei seguenti paesi: Cina, EPE (European Patent Device), Francia, Polinesia francese, Giappone, Corea del Sud, USA

*Istruzioni per l'uso

MOBIDERM autofit

Indumenti di mobilizzazione standard regolabili



Prodotto standard

Disponibilità immediata*

Descrizione

Gli indumenti **MOBIDERM autofit** sono progettati per mobilizzare i tessuti sottocutanei edematosi o induriti. Sono destinati al trattamento del linfedema durante la fase di mantenimento, il giorno - a riposo - e la notte. Gli indumenti Autofit, standard e regolabili, si adattano alla maggior parte delle morfologie corporee delle pazienti e alla loro evoluzione nel tempo.

Sono disponibili in più modelli:

- Per l'arto superiore: **MOBIDERM autofit** manicotto con mezzo-guanto e pollice
- Per l'arto inferiore: **MOBIDERM autofit** gambaletto sotto il ginocchio e calza-coscia

Per quali pazienti

Gli indumenti **MOBIDERM autofit** sono consigliati per pazienti che presentano:

- Linfedema da lieve a moderato
- Forma regolare o non regolare dell'arto
- Edema stabile o evolutivo






Meccanismo d'azione

Gli indumenti **MOBIDERM autofit** incorporano la tecnologia **MOBIDERM** costituita da blocchi di schiuma racchiusi tra due bende in tessuto non tessuto.

Il differenziale di pressione che si crea tra l'area di azione di ogni blocco e l'area circostante, favorisce il flusso del liquido linfatico e ottimizza l'efficacia del drenaggio⁽¹⁾⁽³⁾.

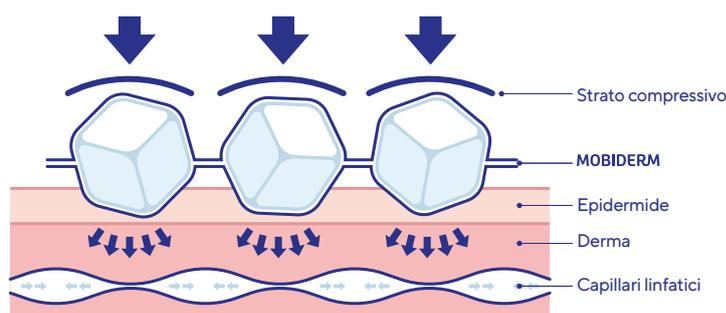

Caratteristiche

Composizione⁽²⁾:

- Strato esterno: poliestere, poliammide, elasthan
- Strato interno lungo l'arto: tessuto non tessuto, schiuma di poliuretano (blocchi da 15 x 15 mm)
- Strato interno all'estremità (mano/piede): tessuto non tessuto, schiuma di polietilene (blocchi da 5 x 5 mm)

Colore: beige



(1) Todd - Mobiderm Autofit: an adjustable sleeve that enables patients to self-manage lymphedema - Chronic edema - April 2018 - Page 6

(2) La lista completa dei componenti è disponibile nelle istruzioni per l'uso

(3) Mestre - Interest of an auto-adjustable night-time compression sleeve (MOBIDERM Autofit) in maintenance phase of upper limb lymphedema: the MARILYN pilot RCT - Support Care Cancer (25:2455-2462) - 2017



Dispositivo
brevettato⁽¹⁾



Indicatori di serraggio

- adattabile alla maggior parte delle morfologie
- applicazione precisa e ripetibile, controllo della variazione del volume dell'edema

Elementi di fissaggio auto-grippanti

- configurazione semplice e veloce⁽²⁾




Manica con mezzo-guanto integrato

- aiuta a limitare il rischio di migrazione dell'edema
- lascia libera la mano per lo svolgimento delle azioni abituali



Indumento semi-aperto

- facile da indossare e da togliere⁽²⁾

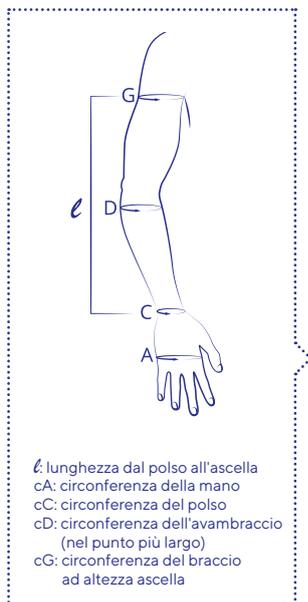

Taglie

Taglia	cG (in cm)	cD (in cm)	cC (in cm)	cA (in cm)	Codice	
					Normale $\ell = 40 - 45$ cm	Lungo $\ell = 45 - 50$ cm
Manicotto destro o sinistro						
1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32		
2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36		
3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40		
4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44	3733	
5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48		
6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52		

(1) Solo nei seguenti paesi: Algeria, Austria, Belgio, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Marocco, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Regno Unito
 (2) Mestre – Interest of an auto-adjustable night-time compression sleeve (MOBIDERM Autofit) in maintenance phase of upper limb lymphedema: the MARILYN pilot RCT – Support Care Cancer (25:2455-2462) – 2017 – Page 6



Arto inferiore



Indicatori di serraggio

- adattabile alla maggior parte delle morfologie
- applicazione precisa e ripetibile, controllo della variazione del volume dell'edema



Elementi di fissaggio auto-grippanti

- configurazione semplice e veloce⁽²⁾

Doppia linea di fissaggio

- ampia possibilità di adattamento
- consente l'uso sulla gamba destra o sinistra




Dispositivo
brevettato




Indumento semi-aperto

- facile da indossare e da togliere⁽²⁾

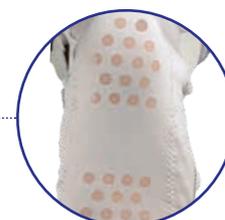

Suola antiscivolo

- limita il rischio di scivolamento durante la deambulazione

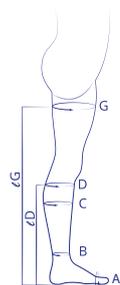

- lD: altezza dal pavimento al ginocchio (misura rilevata sotto la piega del ginocchio, lato posteriore)
- lG: altezza dal pavimento alla coscia (misura all'altezza della piega glutea)
- cB: circonferenza della caviglia (nel punto più stretto)
- cC: circonferenza del polpaccio (nel punto più largo)
- cD: circonferenza sotto il ginocchio (sulla testa del perone)
- cG: circonferenza della coscia (nel punto più largo)

Taglia	cB (in cm)	cC (in cm)	Sotto il ginocchio cD (in cm)	Coscia cG (in cm)
1	16 - 24	24 - 35	25 - 36	46 - 57
2	20 - 28	32 - 43	32 - 43	53 - 65
3	24 - 32	40 - 51	39 - 50	61 - 72
4	28 - 36	48 - 59	46 - 57	68 - 80

Taglie

Gambaletto sotto il ginocchio - Codice (destro/sinistro)

Taglia	Corto lD = 38 - 40 cm	Normale lD = 40 - 42 cm	Lungo lD = 42 - 44 cm	Extra lungo lD = 44 - 46 cm
1				
2				
3			3734	
4				

Calza-coscia - Codice (destro/sinistro)

Taglia	Corto lG = 67 - 72 cm	Normale lG = 72 - 77 cm	Lungo lG = 77 - 82 cm	Extra lungo lG = 82 - 87 cm
1				
2				
3			3735	
4				

MOBIDERM SU MISURA O STANDARD



Prodotto standard

Disponibilità immediata*

Descrizione

Gli indumenti **MOBIDERM** standard sono progettati per mobilizzare i tessuti sottocutanei edematosi o induriti. Sono destinati al trattamento del linfedema durante la fase di mantenimento, il giorno - a riposo - e la notte. Sono disponibili in 3 modelli: manicotto, guanto o mezzo-guanto

Per quali pazienti

Gli indumenti **MOBIDERM** standard sono consigliati per pazienti che presentano:

- Linfedema da lieve a moderato
- Forma regolare dell'arto
- Volume stabile del linfedema

Caratteristiche

Composizione⁽¹⁾:

- Strato esterno: poliammide, elasthan
- Strato interno manicotto: tessuto non tessuto, schiuma di poliuretano (blocchi di 15 x 15 mm)
- Strato interno mezzo-guanto e guanto: tessuto non tessuto, schiuma di polietilene (blocchi da 5 x 5 mm)

Colore: beige



Manicotto

Taglia	cC (in cm)	cE (in cm)	cG (in cm)	Codice (destra/sinistra)	
				Normale ℓ = 40 - 45 cm	Lungo ℓ = 45 - 50 cm
1	14 - 16	22 - 25	25 - 29	3730	
1+					
2	16 - 18	25 - 28	29 - 33		
2+					
3	18 - 20	28 - 31	32 - 36		
3+					
4	20 - 22	31 - 34	35 - 39		
4+					
5	22 - 24	34 - 37	38 - 42		
5+					



A: circonferenza della mano
(testa delle ossa metacarpali)

C: circonferenza del polso

E: circonferenza del gomito

G: circonferenza del braccio ad altezza ascella



Guanto

Taglia	cC (in cm)	cA (in cm)	Codice	
			Destro	Sinistro
1	14 - 16	15 - 17	3732	
2	16 - 18	17 - 19		
3	17 - 19	19 - 21		
4	19 - 21	21 - 23		
5	20 - 22	23 - 25		
6	21 - 23	25 - 27		

Mezzo-guanto

Taglia	cC (in cm)	cA (in cm)	Codice
			Destro/Sinistro
1	14 - 16	15 - 17	3731
2	16 - 18	17 - 19	
3	17 - 19	19 - 21	
4	19 - 21	21 - 23	
5	20 - 22	23 - 25	
6	21 - 23	25 - 27	

*Rispetto ai dispositivi su misura

(1) La lista completa dei componenti è disponibile nelle istruzioni per l'uso



INDUMENTI MOBIDERM SU MISURA



Descrizione

Gli indumenti per pazienti **MOBIDERM** realizzati su misura sono progettati per mobilizzare i tessuti sottocutanei edematosi o induriti.

Sono destinati al trattamento del linfedema durante la fase di mantenimento, il giorno - a riposo - e la notte.

Sono disponibili in più modelli:

- Per l'arto superiore: manicotto ①, manicotto con mezzo-guanto senza pollice ② o manicotto con mezzo-guanto e pollice ③
- Per l'arto inferiore: gambaletto sotto il ginocchio ④ o calza-coscia ⑤

Per quali pazienti

Gli indumenti **MOBIDERM** su misura sono consigliati per pazienti che presentano:

- Linfedema da moderato a grave
- Forma dell'arto non regolare
- Taglia fuori standard
- Volume stabile del linfedema

Caratteristiche

Composizione⁽¹⁾:

- Strato esterno: poliammide, elasthan
- Strato interno: tessuto non tessuto, schiuma di poliuretano (blocchi di 15 x 15 mm) o schiuma di polietilene (blocchi da 5 x 5 mm)

Colore: beige



DISPOSITIVI PER PAZIENTI SU MISURA

La predisposizione di un dispositivo su misura richiede necessariamente il coinvolgimento di un operatore sanitario qualificato.

I moduli per la presa e la trasmissione delle misure sono disponibili sul nostro sito web e presso il nostro Servizio Clienti (servizioclienti@thuasne.it)






Istruzioni per l'utilizzo

I capi MOBIDERM possono essere indossati direttamente sulla pelle o dopo aver applicato uno strato di cotone intermedio in caso di pelle sensibile


MOBIDERM SU MISURA O STANDARD

- Girare l'indumento su se stesso **1**
- Far scorrere l'indumento lungo l'arto fino alla posizione desiderata **2**
- Massaggiare l'arto per garantire una distribuzione uniforme dei blocchi di schiuma **3**
- *Per mezzo-guanto e guanto* - Assicurarsi che i blocchi di schiuma siano posizionati sulla parte superiore della mano
- *Per mezzo-guanto e guanto* - Se abbinato a un manicotto, posizionarlo al di sopra dello stesso
- *Per mezzo-guanto* - L'indumento è ambidestro (girandolo completamente su se stesso)

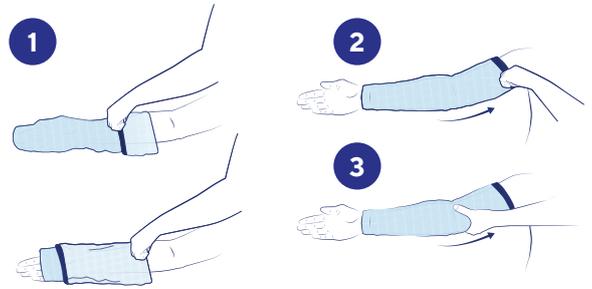

MOBIDERM autofit

- Aprire tutte le chiusure a strappo **1**
- Far scorrere l'indumento lungo l'arto fino alla posizione desiderata **2**
- Serrare le chiusure a strappo iniziando dall'estremità distale e risalendo verso l'alto **3**
- Procedere progressivamente fino a raggiungere l'impostazione raccomandata dal proprio medico/terapista (+/++/+++ /++++)
- Massaggiare l'arto per garantire una distribuzione uniforme dei blocchi di schiuma **4**

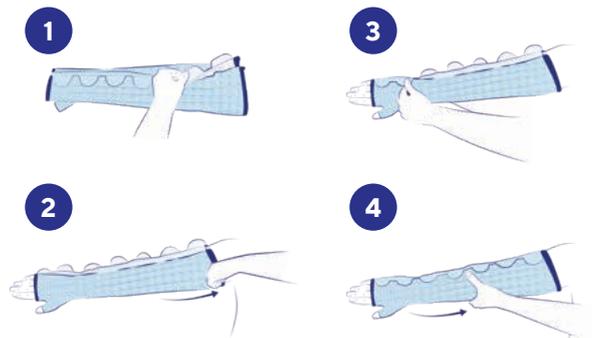

Istruzioni per la cura

Si consiglia di lavare l'indumento MOBIDERM quotidianamente (o dopo ogni utilizzo)

TUTTI GLI INDUMENTI MOBIDERM

- Lavare in lavatrice a ciclo "lana" o a temperatura fredda
- Utilizzare un prodotto di lavaggio senza ammorbidente. Non utilizzare detersivi, ammorbidenti o prodotti aggressivi (prodotti contenenti cloro)
- Mettere il capo in un sacchetto di lavaggio per assicurarsi che altri capi (in particolare quelli con chiusure a contatto o cerniere) non possano danneggiarlo
- Asciugare bene lontano da fonti di calore dirette (termosifoni, sole, etc.)
- Non asciugare in asciugatrice
- Non stirare



MOBIDERM autofit

Quando non utilizzato, l'indumento deve essere tenuto in piano, con le chiusure auto-grippanti chiuse. Se è necessario piegarlo, posizionare le chiusure rivolte verso l'esterno



Scoprite tutti i video tutorial disponibili che presentano le istruzioni di utilizzo di **MOBIDERM autofit** sul nostro canale **YouTube Thusne!**



GRANDI USTIONI E TRATTAMENTO DELLE CICATRICI

Le ustioni sono una patologia caratterizzata da uno spettro molto ampio di potenziale gravità.

C'è una grande differenza tra un'ustione superficiale di pochi centimetri quadrati (che guarisce senza sequele nel giro di pochi giorni) e un'ustione profonda che ricopre un'ampia porzione della pelle, pericolosa per la vita e in grado di compromettere le funzioni del paziente⁽¹⁾.

Nel 2004, circa 11 milioni di persone a livello globale hanno subito un'ustione che ha richiesto cure mediche specialistiche (Shpichka et al. 2019) (Moiemen et al. 2018)⁽¹⁾.

Il trattamento di un'ustione in un'unità specializzata dipende dal tipo di ustione e dalla sua localizzazione, dalla profondità delle lesioni e dall'ampiezza della superficie ustionata⁽²⁾.

Il trattamento delle cicatrici con la compressione

Con un'ustione profonda di secondo grado, il paziente è a rischio di sviluppare una cicatrice ipertrofica che può degenerare in un cheloide⁽²⁾.

Indossare indumenti compressivi riduce⁽²⁾:

- il flusso sanguigno (ridotto flusso di ossigeno)
- la proliferazione dei fibroblasti
- la sintesi del collagene
- il rischio di infiammazione locale (prurito, edema...)



(1) Dossier marcatura CE

(2) Roehet - Rééducation et réadaptation de l'adulte brûlé - Encyclopédie Médico Chirurgicale (26-280-C-10) - 1998 - Page 1 & 5 (Rehabilitation of the burned adult - Encyclopedia Medico Surgical)

CICATREX

Indumenti compressivi specialistici

Descrizione


Il Programma Cicatrex offre:

- un'ampia gamma di tessuti che soddisfa la maggior parte delle esigenze dei pazienti
- un processo di produzione preciso e digitalizzato nelle fasi di realizzazione dell'indumento
- formazione in merito all'appropriatezza prescrittiva e al rilevamento delle misure del paziente


Meccanismo d'azione⁽¹⁾

Il principio di compressione di Cicatrex contribuisce alla riorganizzazione delle fibre di collagene in un piano parallelo alla pelle, limitando così la cicatrizzazione incontrollata del tessuto connettivo


La compressione riduce le cicatrici inestetiche e le aderenze disfunzionali⁽¹⁾

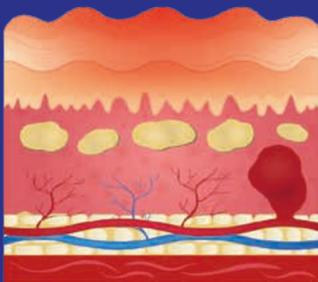

• Cicatrice ipertrofica prima del trattamento⁽²⁾

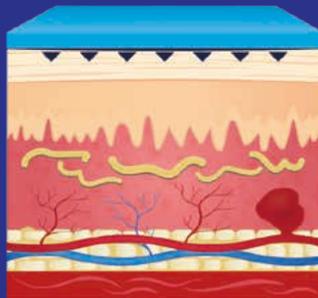

• Effetto della compressione durante il trattamento⁽²⁾
• Riduzione dell'ipervascolarizzazione⁽²⁾
• Riorganizzazione dei fibroblasti⁽²⁾

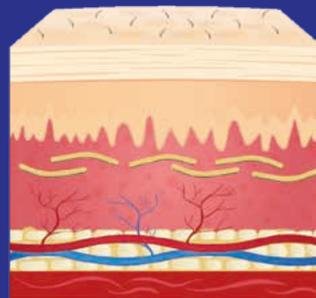

• Cicatrice piatta dopo il trattamento⁽²⁾



USO DEGLI INDUMENTI COMPRESSIVI

È durante la fase di maturazione della cicatrice (che dura circa 18 mesi) che l'efficacia degli indumenti compressivi Cicatrex sarà massima.

Per un trattamento efficace, gli indumenti Cicatrex devono essere utilizzati non appena la guarigione lo consente.

Per quali pazienti

Gli indumenti compressivi Cicatrex rappresentano un metodo di trattamento delle grandi ustioni e aiutano a limitare il ricorso alla chirurgia ricostruttiva.

Tuttavia, i loro benefici non si limitano a questo ambito, poiché possono essere utilizzati anche nel trattamento di altre patologie come il Linfedema o la Sindrome di Ehlers- Danlos*.

Ustioni⁽¹⁾

- Prevenzione e trattamento delle cicatrici ipertrofiche, dei cheloidi e delle retrazioni cicatriziali
- Trattamento delle ustioni termiche, chimiche o elettriche
- Compressione di zone di innesto cutaneo

Linfologia⁽²⁾

- Linfedema pubico e genitale
- Linfedema primario nei bambini
- Mantenimento della riduzione del volume del linfedema

Chirurgia plastica e ricostruttiva

- Prevenzione delle cicatrici ipertrofiche⁽¹⁾
- Trattamento post-operatorio delle cicatrici di origine traumatica e delle ferite chirurgiche
- Post trapianto di pelle

Sindrome di Ehlers-Danlos*⁽³⁾

- Miglioramento della propriocezione grazie alla compressione degli arti
- Alterazione del dolore
- Compressione da 6 a 13.5 mmHg

Prevenzione della neuropatia periferica delle estremità indotta dalla chemioterapia

(guanti e calze)



(1) Monstrey S, et al. - Updated Scar Management Practical Guidelines: Noninvasive and invasive measures - Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery - 2014

(2) HAS Report - Medical compression in lymphedema therapy - 2010

(3) HAS Report - Compressive garments in the treatment of Ehlers-Danlos syndrome - Jan 2010 - Page 4

* Modelli specifici

Tessuti

CICATREX FINE*




Gli indumenti compressivi Cicatrex Fine sono realizzati con fibre extra-fine ad alta tecnologia. La finezza del tessuto Cicatrex Fine⁽²⁾ lo rende particolarmente adatto per la produzione di indumenti per le dita di mani e piedi.

CICATREX NATURE



Gli indumenti compressivi Cicatrex Nature contengono un'alta percentuale di viscosa. Ricavata da materie prime naturali (legno), questa fibra è molto morbida sulla pelle, permeabile e traspirante, rendendo i capi estremamente confortevoli da indossare⁽¹⁾.


Standard

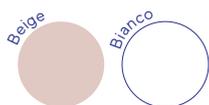


Su misura



Standard

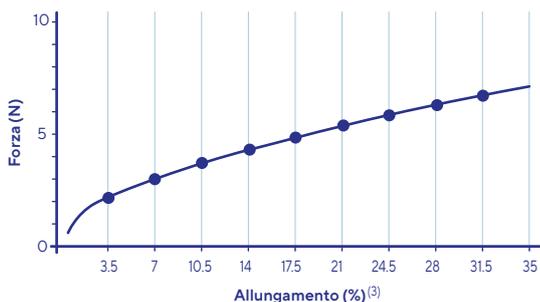

- **Morbido e fine⁽²⁾**
- **Traspirante⁽²⁾**
- **Asciugatura rapida⁽²⁾**

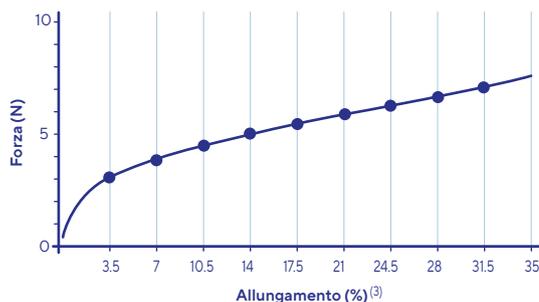

- **Buona resistenza all'usura**, ottenuta grazie alla presenza di viscosa da fibre naturali⁽¹⁾
- **Buona conformabilità**, si adatta alla morfologia e ai movimenti del paziente
- **Ampia gamma di colori**

* Cicatrex Fine precedentemente "Cicatrex Filifine"

(1) Viscose - L'atelier du papetier - Les fibres textiles - 2020

(2) ETN 274 - Dossier Textile Elasthanne - July Aug 2016 - Page 1

(3) Physical and mechanical testing of textiles - X.Wang, X.Liu, C.Hurren (2008), pp. 90-124, Fabric testing

(4) ETN 280 - Dossier Textile Polyamide - July Aug 2017 - Page 1

CICATREX SKIN





La qualità di Cicatrex Skin si distingue dalla sua maglia finissima, liscia e leggera. La composizione degli indumenti compressivi Cicatrex Skin li rende esteticamente gradevoli e facili da curare⁽⁴⁾. Per l'EDS, sono disponibili solo i modelli guanto, piede e caviglia.

Su misura



Standard

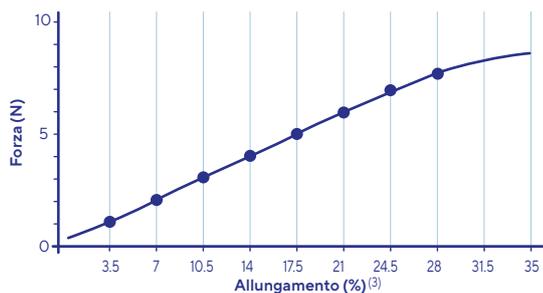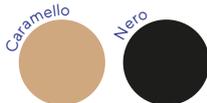

- Aspetto estetico e setoso⁽⁴⁾
- Asciugatura rapida⁽⁴⁾
- Facile da indossare⁽⁴⁾
- Ampia gamma di colori



Il linfedema


Trattamento del linfedema:
la fase di riduzione

Trattamento del linfedema:
la fase di mantenimento

Grandi ustioni
e trattamento delle cicatrici




Su misura

CICATREX RIGID

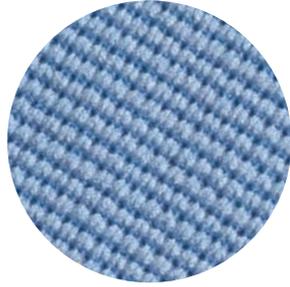

Cicatrex Rigid è un tessuto a trama piatta particolarmente resistente all'usura grazie alla sua composizione. Di conseguenza, è particolarmente adatto ai bambini o alle persone molto attive.

Colori

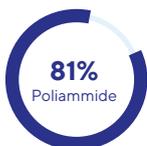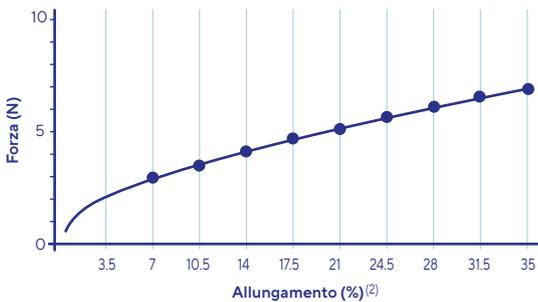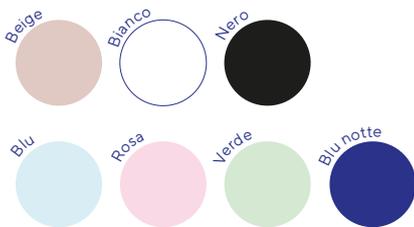


L'ampiezza della gamma Cicatrex consente di soddisfare le diverse esigenze dei pazienti e i requisiti richiesti dagli specialisti. Che si tratti di un indumento compressivo fine ed estetico o di un indumento elastico facile da indossare⁽¹⁾, che le proprietà di resistenza siano una priorità o che si cerchi un colore specifico, è possibile adattare l'indumento compressivo senza compromettere il trattamento.



I CAPI CICATREX SONO REALIZZATI CON TESSUTI ELASTICI *LONG STRETCH*

Questa elevata capacità elastica rende gli indumenti facili da indossare e da togliere.

Inoltre, favorisce la libertà di movimento e offre un buon livello di adattamento alle variazioni di circonferenza.

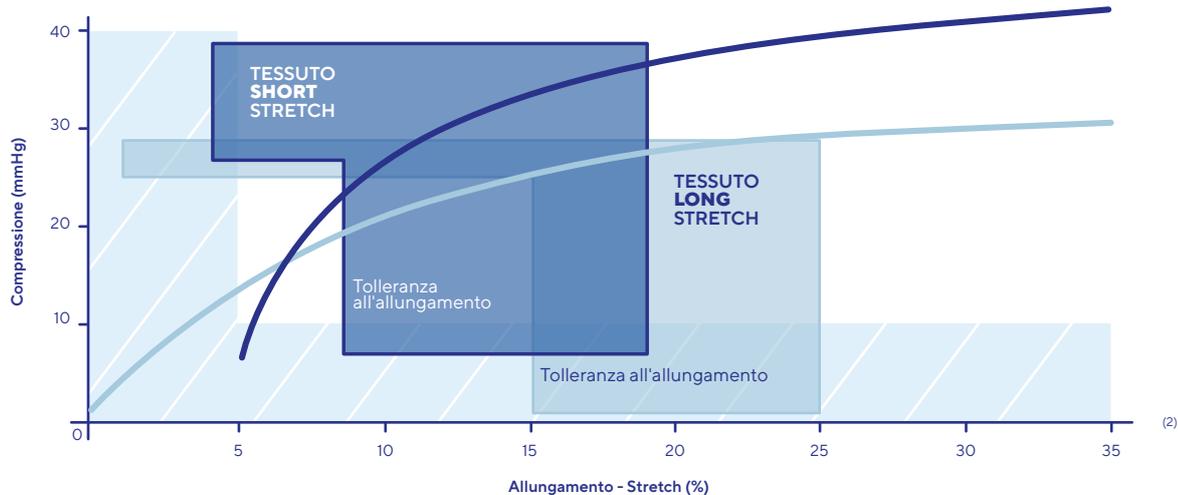

(1) Indagine su utilizzatori finali

Istruzioni per l'utilizzo

- Allungare il più possibile il tessuto elastico in modo da non irritare la pelle fragile durante la vestizione
- Aiutare il tessuto ad adattarsi uniformemente a tutti i contorni delle parti del corpo da coprire, e a posizionarsi correttamente senza intralciare i vestiti e senza risultare troppo stretto
- Assicurarci che ci sia libertà di movimento nella zona dei gomiti e delle spalle

Istruzioni per la cura

- Lavare Cicatrex a mano, tutte le volte che si vuole, utilizzando un sapone o un prodotto studiato per i tessuti delicati. Non aggiungere candeggina o smacchiatori. Risciacquare abbondantemente e strizzare l'acqua in eccesso senza torcere
- Asciugare in piano lontano da fonti di calore dirette (non asciugare su un termosifone, ad esempio)
- Non stirare



CONSIGLIO

Se possibile, è opportuno che il paziente si doti di due indumenti Cicatrex della stessa tipologia, in modo che possa continuare a indossarne uno quando l'altro viene lavato



CICATREX Standard

Indumenti compressivi




Prodotto standard
Disponibilità immediata*

Il linfedema

TABELLA DI MISURAZIONE DEGLI ARTI INFERIORI

(guaina, panty, panty pescatore, pantaloni)

La linea di misurazione della circonferenza del bacino (A) deve trovarsi 3 o 4 cm sopra la cresta pubica nella parte anteriore e a livello della mediana superiore dei glutei nella parte posteriore.

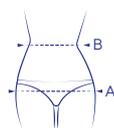

Taglia	Circonferenza del bacino (A)	Circonferenza vita (B)
1	88 - 94 cm	62 - 72 cm
2	95 - 101 cm	67 - 79 cm
3	102 - 108 cm	73 - 85 cm
4	109 - 115 cm	80 - 93 cm
5	116 - 122 cm	90 - 104 cm
6	123 - 129 cm	97 - 113 cm

GUAINA - Cicatrex Nature

Taglia	Codice Bianco	
1	3415	
2		
3		
4		
5		
6		

PANTY - Cicatrex Nature

Taglia	Codice Nero	
1	3403	
2		
3		
4		
5		
6		

PANTY PESCATORE - Cicatrex Nature

Taglia	Codice Nero	
1	3412	
2		
3		
4		
5		
6		

CAPPUCCIO - Cicatrex Nature

Taglia	Circonferenza Testa (A)	Codice Bianco	
0	51 - 52 cm	3402	
1	53 - 55 cm		
2	56 - 57 cm		
3	58 - 59 cm		

CAPPUCCIO PARZIALE - Cicatrex Nature

Taglia	Circonferenza Collo (B)	Codice Bianco	
1	27 - 30 cm	3410	
2	31 - 36 cm		
3	37 - 45 cm		

CAPPUCCIO APERTO - Cicatrex Nature

Taglia	Circonferenza Testa (A)	Codice Bianco	
0	51 - 52 cm	3416	
1	53 - 55 cm		
2	56 - 57 cm		
3	58 - 59 cm		

FASCIA PER LE ORECCHIE - Cicatrex Nature

Taglia	Circonferenza Testa (A)	Codice Bianco	
1	40 - 52 cm	3411	
2	52 - 64 cm		

Trattamento del linfedema:
la fase di riduzione

Trattamento del linfedema:
la fase di mantenimento

Grandi ustioni
e trattamento delle cicatrici

Su misura

CICATREX Standard

Indumenti compressivi



Prodotto standard

Disponibilità immediata*


GILET SENZA MANICHE - Cicatrex Nature

Taglia	Circonferenza torace (A)	Codice Bianco	
1	74 - 82 cm	3424	
2	83 - 91 cm		
3	92 - 98 cm		
4	99 - 115 cm		
5	116 - 120 cm		
6	121 - 135 cm		



MANICA/GAMBALE LUNGO - Cicatrex Nature

Taglia	Circonferenza distale (A)	Circonferenza prossimale (B)	Altezza (AB)	Codice Bianco	
1	9 - 11 cm	19 - 23 cm	35 cm	3425	
2	11 - 14 cm	23 - 28 cm			
3	14 - 16 cm	28 - 32 cm			
4	16 - 20 cm	32 - 37 cm	45 cm		
5	20 - 25 cm	37 - 42 cm			
6	25 - 30 cm	42 - 48 cm			
7	30 - 40 cm	48 - 58 cm			
8	40 - 50 cm	58 - 67 cm			

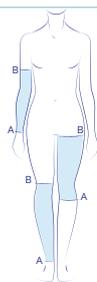


MANICA/GAMBALE - Cicatrex Nature

Taglia	Circonferenza mediale (A) ⁽¹⁾	Altezza	Codice Bianco	
1	12 - 14 cm	20 cm	3400	
2	15 - 17 cm			
3	18 - 22 cm	26 cm		
4	23 - 29 cm			
5	30 - 37 cm			
6	38 - 45 cm			
7	46 - 54 cm			
8	55 - 63 cm			

(1) Misura al centro della manica/gamba

MANICOTTO PER LINFEDEMA - Cicatrex Skin

Taglia	Circonferenza distale (A)	Circonferenza mediale (B)	Circonferenza prossimale (C)	Altezza (AC)	Codice Caramello	
1	13 - 15 cm	20 - 25 cm	22 - 28 cm	39 cm	3449	
2	15 - 17 cm	23 - 28 cm	25 - 31 cm	39 cm		
3	17 - 19 cm	26 - 31 cm	29 - 35 cm	39 cm		
4	19 - 21 cm	29 - 34 cm	33 - 39 cm	39 cm		
5	21 - 23 cm	32 - 37 cm	37 - 43 cm	39 cm		
6	23 - 26 cm	35 - 41 cm	41 - 48 cm	39 cm		

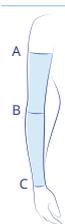


GUANTO TABELLA DI MISURAZIONE



Taglia	Circonferenza della mano (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm

GUANTO - Cicatrex Skin Manica lunga e dita chiuse (al gomito)

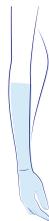

Taglia	Codice Nero	Codice Caramello
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

344805

GUANTO - Cicatrex Skin Manica corta e dita chiuse (al polso)



Taglia	Codice Nero	Codice Caramello
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

344806

GUANTO - Cicatrex Skin Manica corta e dita aperte (al polso)



Taglia	Codice Nero	Codice Caramello
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

344807

GUANTO IN MICROFIBRA - Cicatrex Fine Dita aperte



Taglia	Circonferenza della mano (A)	Codice Bianco	Codice Beige
1	13 - 14,5 cm		
2	15 - 16,5 cm		
3	16,5 - 18 cm		
4	18,5 - 20 cm		
5	20,5 - 22 cm		
6	22,5 - 24 cm		

3447

PROTEZIONE DITA

Cicatrex Skin



Taglia	Circonferenza dito (A) ⁽¹⁾	Altezza	Codice Caramello
1	25 - 27 mm	100 - 110 mm	
2	29 - 31 mm		

3446

(1) Misura alla base del dito

GUANTO PIEDE - Cicatrex Skin



Taglia	Circonferenza (A) ⁽²⁾	Codice Nero	Codice Caramello
1	21 - 22 cm		
2	23 - 24 cm		
3	25 - 26 cm		
4	27 - 28 cm		

340603

(2) Misura alla testa delle ossa metatarsali



CONSIGLIO

Alcuni modelli sono disponibili anche nella gamma indumenti su misura


Il linfedema

Trattamento del linfedema:
la fase di riduzione

Trattamento del linfedema:
la fase di mantenimento

Grandi ustioni
e trattamento delle cicatrici

Su misura

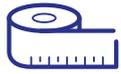


CICATREX su misura

Indumenti compressivi


Torso

Modelli	Spalliera Raglan Body Maglia Addome
Tessuti	Nature Skin Rigid
Collo	Scollo a V Collo rotondo Collo rialzato
Apertura/chiusura	Cerniera Ganci Anteriore o posteriore
Altre opzioni	Cuscinetto di compressione Cinghia inguinale Coppa con o senza compressione Ascella con o senza compressione Cintura Aperture supplementari (cerniera, chiusure auto-grippanti) Chiusure auto-grippanti per il fissaggio alla mutandina Fodera in tessuto morbido

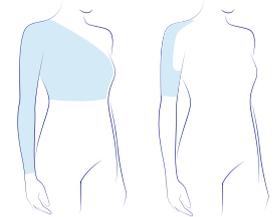

Spalliera

Raglan

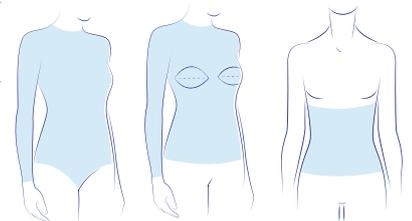


Body

Maglia

Addome


Mano

Modelli	Dita Mezzo-guanto Granto dita aperte Guanto
Tessuti	Nature (eccetto modelli dito) Skin Rigid
Opzioni per l'estremità prossimale	Con manicotto (oltre 5 cm e fino all'ascella con lunghezza sul polso di 5 cm max): • attaccato • separato
Apertura/chiusura	Cerniera/chiusure auto-grippanti: • palmo della mano • dorso della mano • lato mignolo
Opzioni di protezione dita	Con cinturino Senza cinturino
Altre opzioni	Cuscinetto di compressione: • palmo della mano • dorso della mano • fisso • rimovibile Supporto per il palmo della mano

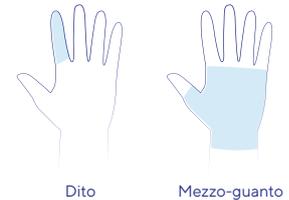

Dito

Mezzo-guanto

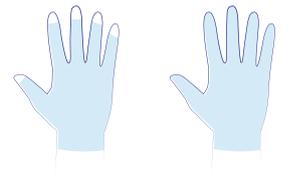


Guanto dita aperte

Guanto

Braccio

Modello	Manicotto
Tessuti	Nature Skin Rigid
Sistema di fissaggio	Senza antiscivolo Treccia elastica liscia Antiscivolo con punti di silicone Coprispalla Attacco per la spalla
Apertura/chiusura	Cerniera/chiusure auto-grippanti • lato giuntura • lato dorso della mano • lato palmo della mano
Altra opzione	Cuscinetto di compressione

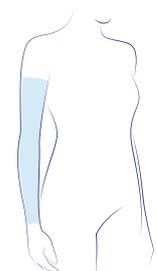

Manicotto

Testa

Modelli	Cappuccio Cappuccio aperto Fascia testa Fascia mento
Tessuti	Nature Skin
Viso	Scoperto Coperto
Cresta del naso	Scoperta Coperta
Orecchie	Scoperte Coperte
Altra opzione	Cuscinetto di compressione Altezza colletto 5, 7, 10, 13 cm



Cappuccio



Cappuccio
aperto




Fascia testa



Fascia mento

Gamba

Modelli	Calzino Panty Solo gamba Mezzo collant
Tessuti	Nature Skin Rigid
Aperture sul ventre	Cerniera/chiusure auto-grippanti: • fronte/retro • destra/sinistra
Inguine	Aperto con o senza ritaglio igienico Chiuso con o senza soffietto Tasca a marsupio
Aperture sulle gambe	Chiusura a cerniera/auto-grippante: • fronte/retro • interno/esterno
Sistema di fissaggio	Cintura Bretelle Senza antiscivolo Treccia elastica liscia 3 cm Antiscivolo con punti di silicone Auto-grippanti gilet su panty Auto-grippanti panty su gilet
Piede	Attaccato/separato Punta aperta/chiusa
Altre opzioni	Cuscinetto di compressione Fodera in tessuto morbido (ginocchio/ tallone)

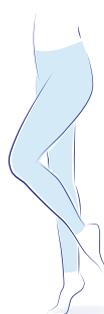

Panty



Mezzo collant



Solo gamba



Calzino

Piede

Modello	Guanto per piede punta aperta Guanto per piede punta chiusa
Tessuti	Nature Skin Rigid
Opzioni dita	Punta aperta Punta chiusa
Altra opzione	Cuscinetto di compressione



Guanto per piede
punta aperta



Guanto per piede
punta chiusa



DISPOSITIVI PER PAZIENTI SU MISURA

La predisposizione di un dispositivo su misura richiede necessariamente il coinvolgimento di un operatore sanitario qualificato.

I moduli per la presa e la trasmissione delle misure sono disponibili sul nostro sito web e presso il nostro Servizio Clienti (servizioclienti@thuasne.it)



CICATREX CONTOUR

Dispositivi compressivi da utilizzare dopo interventi di chirurgia plastica ed estetica

I Dispositivi compressivi Cicatrex contour, di classe 2 (RAL), supportano la **compensazione post-operatoria delle irregolarità presenti sulla superficie cutanea.**

Il materiale di alta qualità utilizzato per la loro realizzazione⁽¹⁾ è in grado di ottimizzare la **modellatura, prevenire in gran parte le irregolarità dei contorni corporei e migliorare la guarigione della cicatrici⁽²⁾.**

Indicazioni principali

- Liposuzione
- Lifting delle cosce
- Addominoplastica

Leggings e Leggings a vita alta

Il design alla moda⁽²⁾ e i dettagli studiati per garantire un comfort elevato⁽¹⁾ favoriscono il costante utilizzo del dispositivo e quindi la stabilizzazione del risultato chirurgico

- Materiale compressivo di alta qualità per una pressione uniforme in classe 2 (RAL)
- Degressione naturale della compressione secondo la morfologia corporea
- Compressione più elevata nell'area distale per evitare la "dislocazione" di fluidi
- Cavallo aperto - facilita l'uso costante del dispositivo per tutto il giorno
- Cerniere con ganci e occhielli su entrambi i lati per una chiusura facilitata
- Superficie liscia per facilitare la vestizione e la caduta naturale degli indumenti
- Materiale otticamente neutro che può essere abbinato all'abbigliamento di tutti i giorni
- Modelli a vita alta o bassa da utilizzare in base all'intervento chirurgico (coscia, stomaco, etc.)



Imbottitura extra per il cavallo aperto a protezione della pelle sensibile⁽¹⁾



Prodotto standard

Disponibilità immediata*

Guaina a vita alta

Il design alla moda e i dettagli studiati per garantire un comfort elevato⁽²⁾ favoriscono il costante utilizzo del dispositivo e quindi la stabilizzazione del risultato chirurgico

- Materiale compressivo di alta qualità per una pressione uniforme in classe 2 (RAL)
- Cerniere con ganci e occhielli su entrambi i lati per una chiusura facilitata
- Superficie liscia per facilitare la vestizione e la caduta naturale degli indumenti
- Materiale otticamente neutro che può essere abbinato all'abbigliamento di tutti i giorni



Chiusura del cavallo con ganci e occhielli



Il linfedema

Trattamento del linfedema:
la fase di riduzione

Trattamento del linfedema:
la fase di mantenimento

Taglia	Misure circonferenze			Codice		
	Vita	Glutei	Cosce	Guaina	Leggings	Leggings a vita alta
XS	61 - 66 cm	86 - 91 cm	48 - 51 cm			
S	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm			
M	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm			
L	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm			
XL	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm	3481	3482	3483
XXL	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm			
XXXL	99 - 109 cm	124 - 135 cm	70 - 77 cm			
XXXXL	109 - 119 cm	135 - 145 cm	77 - 86 cm			

Grandi ustioni
e trattamento delle cicatrici



Su misura

* Rispetto ai dispositivi su misura

Indumenti **CICATREX** su misura

Indumenti compressivi

Zoom su alcune opzioni

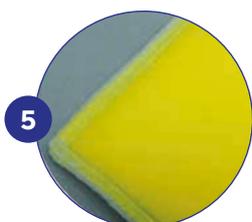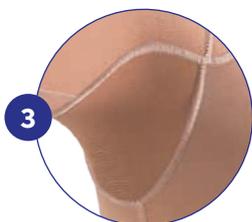

1 Sistemi di chiusura

- Facilitano l'indossamento e la rimozione dell'indumento, in particolare per i pazienti immobili
- La loro posizione è personalizzata in base alla forma dell'indumento

2 Cuscinetto di compressione

- Utilizzato per aumentare localmente la pressione esercitata sulla pelle
- Cucito all'interno dell'indumento o rimovibile

3 Tessuto non-compressivo

- Per un maggiore comfort, zone di tessuto non compressivo possono essere aggiunte in corrispondenza di ascelle, torace o tra le dita, se il trattamento non richiede alcuna compressione in queste regioni

4 Cuciture

- Le cuciture piatte sono all'esterno dell'indumento, per limitare l'irritazione della pelle sensibile

5 Schiuma a memoria di forma

- Comprime le disuguaglianze e distribuisce la pressione.
- Applicata in una specifica tasca

6 Separatori per le dita

- Compressione rinforzata tra le dita
- Adatti all'uso con un guanto

7 Tessuto siliconico e silicone cucito


- Ammorbidiscono il tessuto cicatriziale

8 Toppe decorative⁽¹⁾


- Per personalizzare l'indumento
- Elenco completo delle toppe disponibile su richiesta




Gufo

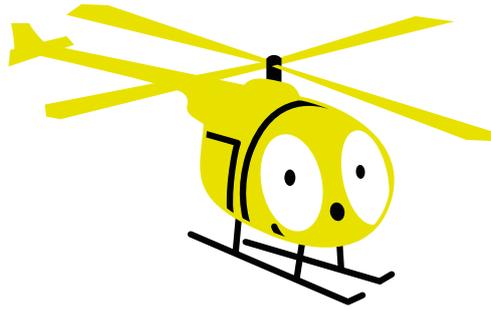

Elicottero

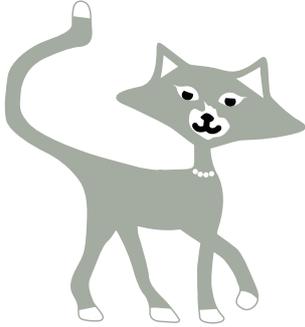

Gatto

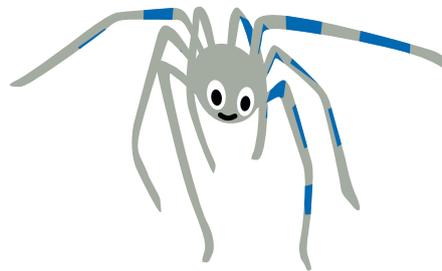

Ragnetto

(1) Fotografie non contrattuali. Lista non esaustiva e variabile in base alla disponibilità

Il "su misura" di Thuasne: qualche cifra



85 persone

dedicate alla soddisfazione
dei nostri clienti e dei pazienti



Tempi di consegna **celeri**



Circa

80,000

dispositivi confezionati
ogni anno



I moduli per la presa e la
trasmissione delle misure sono
disponibili sul nostro sito web e
presso il nostro Servizio Clienti
servizioclienti@thuasne.it



**Tecnologia
CAMMK**


Computer Assisted Made-to-Measure
Knitting consente la produzione di
dispositivi completamente adattati alla
morfologia corporea dei pazienti
da trattare



Una vasta offerta di

400

referenze di prodotto
(tra tutte le gamme)

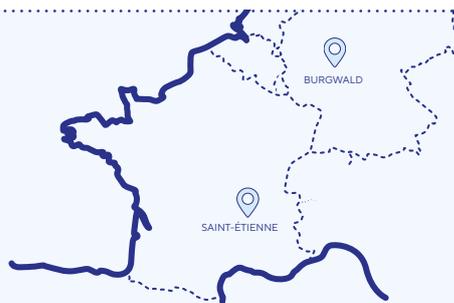

2 siti produttivi dedicati

**IN FRANCIA
(St-Etienne)**

Mobiderm - Cicatrex
Lymphatrex Essential
Lymphatrex Expert

**IN GERMANIA
(Burgwald)**

Cicatrex
Lymphatrex

Presenza misure

Alcuni promemoria essenziali

- La presa misure deve essere eseguita da un operatore sanitario adeguatamente addestrato e, in particolare, a conoscenza delle specificità delle misurazioni Thuasne
- Il corretto confezionamento dell'indumento dipende dalla trasmissione di misure corrette
- Le misurazioni devono essere effettuate preferibilmente al mattino o dopo il drenaggio linfatico manuale e al termine del trattamento intensivo in caso di primo utilizzo

Protocollo generale

- 1 - Selezionare la scheda "presa misure" corrispondente alla gamma di prodotto e al dispositivo desiderato
- 2 - Leggere l'intero modulo
- 3 - Completare le informazioni di intestazione
- 4 - Selezionare il modello desiderato, disegnarlo sul modulo e barrare le misure inutili
- 5 - Selezionare le opzioni desiderate
- 6 - Disegnare tutti i marcatori anatomici sul paziente in base alle linee guida del modulo di misurazione
- 7 - Misurare le circonferenze in corrispondenza dei vari marcatori
- 8 - Misurare le altezze associate ai marcatori

Non esitare ad allegare fotografie o misure aggiuntive alla richiesta per renderla più completa

Strumenti necessari

- Scheda "presa misure"
- Pennarello dermatologico o matita kohl
- Metro a nastro (per braccia/gambe)
- Nastro "lazo" (per le dita di mani/piedi)
- Righello flessibile
- Salviette

I moduli per la presa e la trasmissione delle misure sono disponibili sul nostro sito web e presso il nostro Servizio Clienti (servizioclienti@thuasne.it)



WINGS FOR YOUR HEALTH

Thuasne Italia S.r.l.

Via Alessandro Volta, 94 – 20832 Desio (MB)

Tel. +39 0362 331139

email: thuasne.italia@thuasne.it

www.thuasne.it



Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti senza preavviso rispetto alle descrizioni ed alle illustrazioni del presente catalogo.

Fotografie non contrattuali.

Materiale destinato esclusivamente ai professionisti sanitari.

Qualunque indicazione o suggerimento di utilizzo dei materiali contenuti in questo catalogo non è da intendersi come prescrizione medica.